



# X. Schnell Lichtkraft Therapie

(Quick Light Power Therapy)

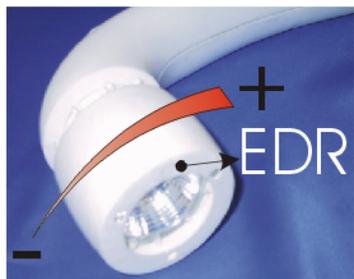

1. Vor der Anwendung; Energiedosis mit Hilfe des Energie-Dosis-Reglers (EDR) einstellen (Bild links)  
Das Handgerät lässt sich mit einem leichten druck auf das Handgerät richtung Anwendungsgebiet einschalten. (Bild rechts)

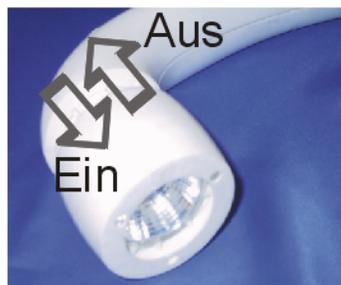

2. Ltt Handgerät auf die Handinnen- und Außenflächen beider Hände, drei mal hintereinander jeweils für ca. 20 sek. mit ca. 3 sek. zwischenpause Anwenden (\*)



3. Die inneren Seiten der beiden Ellenbogengelenke wie im Punkt 2 angedeutet mit dem Ltt Handgerät behandeln.




! Zusätzlich die Schmerzenden Regionen wie im Punkt 2 behandeln. (z.B. Kniekehlen oder entlang des Gürtels, weitere Anwendungsareale auf der Rückseite - Abbildungen A bis H)



## ANWENDUNGSPROSPEKT

Ltt

**licht thermo therapie - Dr. Apul**  
Handgerät

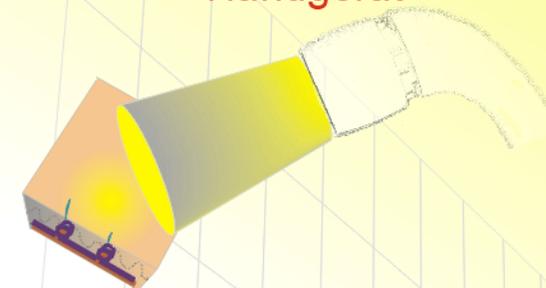

### Ein und Ausschalten des Handgeräts

**Ein:** Durch einem leichten Druck mit dem Handgerät Richtung des behandelnden Körperteils, schaltet sich das Handgerät automatisch ein.  
**Aus:** Wird der Kontakt zu der behandelnden Körperteil unterbrochen, so schaltet sich das Handgerät automatisch ab.



Med. Geräte  
Entwicklung und Vertrieb  
Dr. Apul

(\*) Die Behandlung mit dem Ltt Handgerät auf dem Anwendungsgebiet von einer dauer ca. 5 - 20 Sekunden nennt man **Quantumed - Areal**.  
Drei hintereinander folgende Quantumed-Areal behandlung nennt man **Quantumed - Trial**. Weitere Informationen im Bedienungshandbuch auf Seite 9.