

INHALT:

A- WIRKUNGSWEISE

B- ANWENDUNGSGEBIETE

C- GEGENANZEIGEN

D- INFORMATION UND VORSICHTSMASSNAHMEN

E- NEBENWIRKUNGEN

F- WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN ARZNEIMITTELN

G- ART DER ANWENDUNG UND DOSIERUNG

H- ÜBERDOSIERUNG UND MASSNAHMEN

I- AUFBEWAHRUNG

**J- HERSTELLER, ANGEBOT, FORMEL UND VERPACKUNGSMATERIAL
HERSTELLER UND VERTRIEB**

GENEHMIGUNGSDATUM UND PATENTNUMMER EP 1005 880
DE 19856002

A- WIRKUNGSWEISE:

- Um die Lichtenergie an körperlichen Zellen abzugeben (applizieren), wurde dieses Gerät speziell hergestellt.
- Unser Lebensabschnitt ist mit viel Streß verbunden; um den mit Streß verbundenen Energieverlust zu ergänzen, ist dieses eine Behandlungsweise, die sehr wirksam ist.
- Die Behandlung wirkt durchblutungsfördernd.
- Vermindert die Muskelspannungen. Am Anfang kann es zur Vermehrung der Schmerzen kommen.
- Bei richtiger Anwendung werden die Schmerzen / Beschwerden beseitigt.
- Lokale oder regionale Hyperthermie.
- Die Anwendung ist auch bei mittelgradigen Depressionen sehr wirksam.
- Beseitigt die Schlaflosigkeit.

B- ANWENDUNGSGEBIETE:

- Chronische rheumatische Beschwerden
- Nacken-, Schulter-, Rückenschmerzen

- Spondylitis ankylosans (M. Bechterew)
- Chronische Rückenschmerzen, Gewebe- und Muskelschmerzen
- Nacken- und Schulter Syndrom
- mittelgradige Depression, Schlaflosigkeit und Wetterfühligkeit
- Regelschmerzen (Dysmenorrhoe)
- Bei Gewichtsabnahme
- Je nach Krankheitsstärke kann man die Tagesbehandlung 1-4 mal durchführen.

C- GEGENANZEIGEN:

- Bei Schwangerschaft und Kindern unter 16 Jahren sollte die **ltt** Handgerät nicht angewendet werden.
- Schuppenflechte, auf Wunden, bei (Varicosis) Krampfadern und offenen Wunden (Ulcus cruris) sollte man es nicht anwenden.
- Bei verschiedenen Lähmungen - Hemiplegie nicht anwenden, da Verbrennungsgefahr möglich ist.
- Bei akuten Oberbauch - Beschwerden (z.B. Appendizitis) darf man es nicht anwenden.
- Bei akuten Fieberkrankheiten und akuten Gelenk- Rheuma Beschwerden sollte man es nicht anwenden.
- Starke Kopfschmerzen

D- INFORMATION UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Das Licht Thermo Therapie Handgerät von Kindern fernhalten und unzugänglich aufbewahren.
- Bei Kindern unter 16 Jahren, nicht anwenden.
- Die Anwendung bei Schwangeren kann zu frühzeitigen Wehenschmerzen führen.
- Während des Wochenbetts kann es angewendet werden.

E- NEBENWIRKUNGEN:

- Bei Patienten mit niedrigem Blutdruck kann es zu Schwindel-Anfällen führen. Bei Patienten mit hohem Blutdruckschwellen

Liebe Patientin, Lieber Patient

Sie haben in Behandlung wegen ihrer Beschwerden das Ltt- Licht Thermo Therapie Handgerät erhalten. Licht ist eine Fraktion vom Leben, schon zu Anfang einer Zeit Ohne Licht ist das Leben nicht vorstellbar.

Für uns ist die Sonne die größte Licht Energiequelle. Im Winter erhalten wir im Nordhemispher weniger Licht, Depression und Schmerzleiden nehmen dadurch zu. Licht Thermo Therapie ist im allgemeinen sehr gut verträglich.

Bitte beachten Sie die Hinweise der Gebrauchsinformationen und suchen Sie bei Anhaltenden Beschwerden einen Arzt auf.