

(Hypertonie) braucht man keine Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
- Beim Auftreten von Nebenwirkungen sofort den Arzt benachrichtigen.

F- WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN ARZNEIMITTELN:

Licht Thermo Therapie Handgerät kann mit anderen Arzneimitteln durchgeführt werden. Sie können ihre Medikamente weiterhin einnehmen.

Die rheumatischen Beschwerden werden weniger und das Einnehmen von Medikamenten wird verringert. Im Blut werden die Fette und das Cholesterin etwas abgebaut, es hängt natürlich mit der Anwendung zusammen.

Licht Thermo Therapie Gerät kann schlaffördernd wirken.

G- ART DER ANWENDUNG UND DOSIERUNG:

Licht Thermo Therapie Handgerät kann am Tag in 3 Stunden Abständen 1-4 mal, ca. Bis jeweils 16 Minuten angewendet werden. Bei sehr starken Schmerzen (Ausnahmen beachten - Punkt C) ist die Anwendung von Licht Thermo Therapie Handgerät mehrmals am Tag zu empfehlen.

H- ÜBER DOSIERUNG UND MASSNAHMEN:

Um eventuelle Verbrennungsgefahren auszuweichen, bitten wir Sie unbedingt die Anweisungen Ihres behandelnden Arztes und der Bedienungsanleitung sorgfältig nachzuvollziehen. Bei einer Überdosis (Schwindelgefühl, starke Kopfschmerzen, schwarz vor den Augen, schwere Übermüdigungserscheinungen), sofort mit der Behandlung aufhören. Und Ihren behandelnden Arzt aufsuchen.

I- AUFBEWAHRUNG:

Das **LTT** - Handgerät bei Nichtbenutzung außschliesslich in der Originalverpackung und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Das **LTT** - Handgerät vor Nässe und Feuchtigkeit schützen.

Das Instrument nicht unter -10°C und über +40°C Raumtemperatur aussetzen. Beim Transport nur die Originalverpackung benutzen.

J- HERSTELLER, SERVICE, ANGEBOT, FORMEL UND VERPACKUNGS- INHALT:

Herstellung und Vertrieb wird außschliesslich durch die Firma **Ltt med. Geräte Entwicklung und Vertrieb Dr. Apol** in Bremen durchgeführt. Der Handel von Original Teilen und Zubehör durch Drittpersonen / Firmen beruht auf eine schriftlich Genehmigung des o.a Vertriebes.

Für Reparaturarbeiten schicken Sie das Handgerät in der Originalverpackung mit Garantie schein und Kassenbon an unsere Service Partner zu. Die Service Adresse finden Sie hierzu in der Bedienungsanleitung auf Seite ...
Laufende Angebote können Sie schriftlich oder telefonisch von unserer Firma anfragen.

Beim Neukauf des **LTT** Handgeräts befindet sich in der Originalverpackung :

- das **LTT** - Handgerät,
- Zwei Stück Ersatz Energie Quellen,
- Zwei Stück Ersatz Distanz Regler,
- Bedienungshandbuch,
- Visuelle Therapie anleitung,
- und dieser Prospekt.
- die Tragetasche
- Aroma - Duftflasche und Zubehör

Das **LTT** - Handgerät ist unter der Genehmigungs- und Patentnummer EP 1005 880, DE 19856002 registriert.

Gutschein

Sie haben ein medizinisches Gerät von der Firma Ltt erhalten. Weitere Fragen Über die Behandlung sind wir gerne für Sie verfügbar. Bei Komplikationen oder Störung des Gerätes können Sie sich unter der genannten Service Adresse melden.

Mit diesem Gutschein können Sie kostenlos Patienteninfomaterial bei unserer Firma anfordern.

Senden Sie diese an:

LTT med. Geräte
Vionvillestr. 7
28211 Bremen

Frau / HerrGeb. Datum:.....

Straße:.....

PLZ / Ort.....